

1セット常備いただくことで

突発の汚物をスピーディーに処理できる

かんたん 汚物処理キット



セット内容



監修：東海大学教授 小沼 博隆
(元・国立医薬品食品衛生研究所 衛生微生物部 室長)

特長 1 分かり易いイラストマニュアル付で、初めて使用する方でも簡単に処理できます。

● 感染リスクのある嘔吐物、排泄物などをすばやく安全に処理できます。

特長 2 充実したセット内容で、汚物による作業者の感染リスクを低減します。

● 汚物回収に便利な紙製ヘラ、感染防止のための使い捨て手袋・帽子などをセットしてあります。
● 靴カバー装着により、広範囲に感染リスクが広がることを抑制します。

特長 3 後処理が容易な高吸収シートで水分をすばやく吸収。

汚物回収後の除菌処理には

『キッチンハイター』
『月星ブリーチC』
『除菌タブレットハイター』
『病院用ハイター』等の
塩素系漂白剤を
ご使用ください。



色柄ものの除菌処理には

じゅうたん等の色柄ものには
『キッチンワイドハイター』
をご使用ください。



自分の身を守るために、必ず着用しましょう

作業時の服装



使い捨て手袋

使い捨てエプロン

使い捨て靴カバー



使い捨て帽子

使い捨てマスク

汚物（嘔吐物、排泄物）には細菌やウイルスがいっぱいです。作業者もご自身の身を守るため、手袋、マスク、エプロン、靴カバー、帽子は必ず着用しましょう。

◎嘔吐などの緊急事態が発生したら

発生

当事者は別の場所へ移動してもらい、手洗い、うがいなどをしっかりとさせてください。衣類が汚れている場合には着替えることをおすすめします。



準備

キットから手袋、エプロンなどの保護具を取り出し着用します。



処理

かんたん汚物処理キットのマニュアルに従って処理してください。



◆目付け・梱内容

品名	梱内容	サイズ(mm)・重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード
かんたん 汚物処理キット	6箱	箱 274×196× 46 250g 梱 293×290× 210 1.8kg	4 901301 505743