


補助パッド
(両面吸収タイプ)

褥瘡
ケア

おむつ内環境改善アイテム

P.Uサルバ尿吸収シート

ポリシートを使用していないため
尿量の多い方、
拘縮・褥瘡のある方に有効

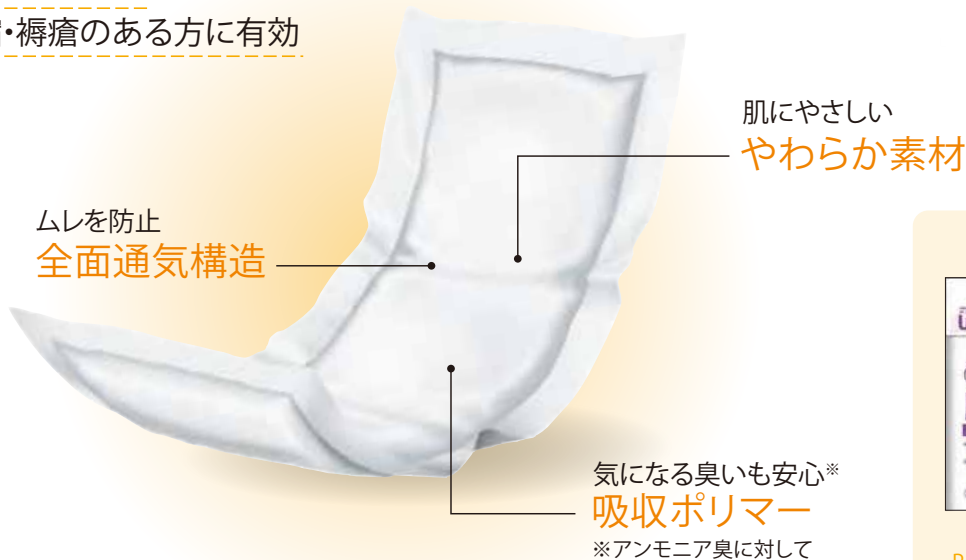

必ずおむつ・パッドの上に
重ねてご使用ください。

併用推奨アイテム

テープ止めタイプ紙おむつ
■サルバ安心Wフィット ⇒23 ページ
■応援介護テープ止めタイプ ⇒24 ページ

尿とりパッド
■サルバフレニューケア ⇒15 ページ
■サルバオーバーナイト ⇒17 ページ
■サルバワイドパッド ⇒19 ページ



P.U. サルバ尿吸収シート
男女共用【30枚入】
サイズ:19cm×42cm


P.U サルバ尿吸収シートの使い方

男性の場合 ★は男性器位置


三角ロール【差し込む】 両サイドロール【おおう】



① 開いてたたむ 男性器を差し込む
② コンパクトにする 男性器を上からかぶせる

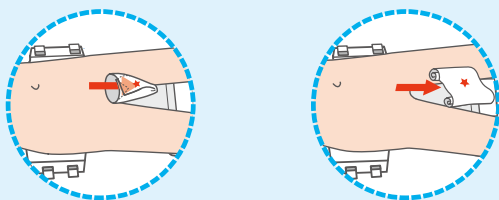

筒ロール【差し込む】

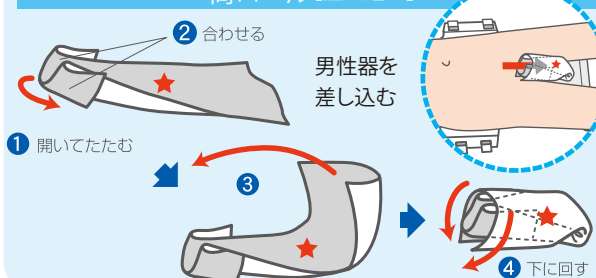

① 開いてたたむ
② 合わせる 男性器を差し込む
③
④ 下に回す

女性の場合 ♥は尿道口位置

3つ折り


片開き



山折にあてる




山折にあてる

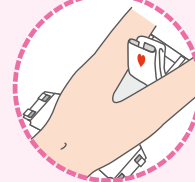



ロール

開いて幅なりに巻く

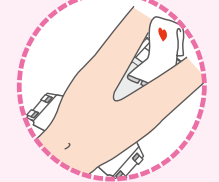

アコーディオン

開いて幅なりにたたむ

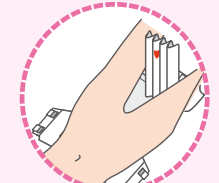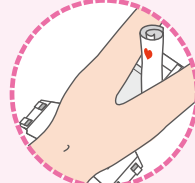

排泄
ケア

腰痛
対策

口腔
ケア

褥瘡
ケア

感染
対策
衛生
ケア